

ÜRÜN TANITIM KARTI



Adı:

Nasomed

Tanımı:

Nasal Kanul Sabitleme Bandı

Kullanıldığı alanlar:

Yoğun Bakım bölümlerinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Hastanın burnuna takılan nasal kanülün burundan düşmesini önlemek ve kanüle destek vermek için kullanılır.

Fonksiyonu:

Bebek modelinde;

Bant bebeğin başını arka kısmından nazikçe sararak destek alır ve öne gelen her iki ucu nasal kanülün deliklerinden geçerek kanülü burna sabitler.

Çocuk modelinde;

Bandın her iki parçasının ucundaki elastik halkalar çocuğun kulaklarına takılır ve uçları da nasal kanülün deliklerinden geçerek kanülü burna sabitler.

Yetişkin modelinde;

Bant orta kısmındaki velkro kilit sayesinde nazal kanülü hastanın burnunda sabit tutar.

Teknik özellikleri:

Ürün; bebek ,çocuk ve yetişkin hasta kullanımını için 3 farklı tipte üretilmektedir (bkz. Model ve ölçüler başlığına).

Bandın parçaları birbirine lamine* edilmiş3 tabakadan meydana gelmiştir. En üstteki tabaka şardonlanmış **(tüylendirilmiş) kumaştan oluşmuştur. Bu tüycükler velkro ***sabitleme parçacıklarının bandı güvenle sabitlemesini sağlarlar.

Orta kısımda banda yumuşaklık sağlayan sünger tabaka vardır.

Bandın cilde temas eden en alt tabakası ise pamuklu penye kumaştandır.

Ürün tek kullanımlıktır ve Gama Işını ile sterilize edilmiştir.

(**Lamine etmek****: (Laminasyon) Farklı malzemelerin ısı altında veya yapıştırıcı madde desteği ile özel yöntemler ve aparatlar kullanılarak birbirine yapıştırılıp tek parça haline getirilme işlemi).

(**Şardonlamak****:Penye, pamuklu veya sentetik kumaşların yüzeylerinin özel bir metot ile tüylendirme işlemi,şardonlanmış kumaş ise bir yüzeyi tüylendirilerek yumuşak ve kadifemsi veya havlumsu hale getirilmiş kumaş)

(**Velkro*****: Çıt çıt veya düğme yerine kullanılan,üzerinde mikro düzeyde plastik kancacıklar olan ve bu mikro kancalar ile tüylü yüzeylere yapışan özel kumaş -cırtlı kumaş).

Modeli / Kodu / Ölçüleri

Bebek ,çocuk ve yetişkin için 3 farklı modeli vardır.

Bebek modeli ;

Ürün tek parça tasarlanmıştır ve standart tek boydur.




43 cm uzunluğunda en geniş yeri 6 cm genişliğinde bir bant görünümündedir, 0,2 cm kalınlığındadır.

Kodu: NTH 5001

Bandın her iki ucunda nasal kanule takıldıktan sonra sabitleme görevi yapan velkro 'dan mamul sabitleme parçacıkları (aksesuarları) vardır .

Çocuk modeli;

Ürün birbirinin aynı olan ,bant şeklinde iki parçadan meydana gelmiştir,tek boydur.

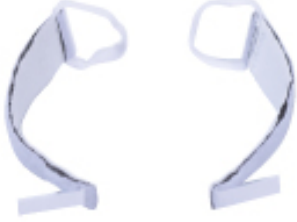

Bantların birer ucunda kulağa geçirilmeye uygun lastik halkalar diğer uçlarında ise nasal kanule takıldıktan sonra sabitleme görevi yapan velkro 'dan mamul sabitleme parçacıkları (aksesuarları) vardır .

Kodu:NTH 5001 TP

Her iki parça da 32 cm uzunluğunda ve 0,4cm kalınlığındadır.

Yetişkin modeli;

Ürün tek boydur,tek parçadan ibarettir.



Şerit görünüşünde ve X harfi şeklinde 4 adet sabitleme kolu olan , kolların kesim noktasında- orta kısımda - kanulu burna sabitlemeye yarayan velkro* 'dan mamul sabitleme aksesuarı mevcut olan bir banttır.

Kodu: NTH 5002

Bandın eni 1,5 cm,boyu X şeklindeki ayağın bağlantı ayaklarının bir ucundan diğerine 65 cm ve kalınlığı 0,3 cm dir.

Bandın X şeklindeki kollarının her bir ucunda , nasal kanule takıldıktan sonra bandı başın arkasında sabitleme görevi yapan, yine velkro 'dan mamul sabitleme parçacıkları (aksesuarları) vardır .

Kullanımı:

Bebek modelinde;

Bandın geniş kısmı bebeğin başının arkasına getirilir,uçları yüzün her iki yanından öne getirilerek burna takılı olan nazal kanulün halkalarından geçirilir ve uçlardaki velkro cırtlar bandın üzerindeki tüylü kısma iliştirilerek işlem tamamlanır.

Çocuk modelinde;

Bandın elastik halkaları kulaktan geçirilir,yüzün her iki yanından öne getirilerek burna takılı olan nazal kanulün halkalarından geçirilir ve uçlardaki velkro cırtlar bandın üzerindeki tüylü kısma iliştirilerek işlem tamamlanır.

Yetişkin modelinde;

Bandın velkro kilit bulunan orta bölümü hastanın dudağı üzerine yerleştirilir, X şeklindeki sabitleme kolları yüzün her iki yanından geçirilerek başın arka kısmına getirilerek velkro kilitler ile uçlarından birbirine sabitlenir. Son olarak orta kısımdaki velkro kilit nazal kanule sarılır ve kanul burna sabitlenir .

Dikkat edilecek hususlar:

Bebek modelinde;

Band nazal kanulün halkalarından geçirilip sabitlenmeden önce bandın gerginliği dikkatlice ayarlanmalı,gevşek olmadığına ve kanülü yerine iyice sabitlediğine dikkat edilmelidir.

Çocuk modelinde;

Band nazal kanulün halkalarından geçirilip sabitlenmeden önce bandın gerginliği dikkatlice ayarlanmalı,gevşek olmadığına,kulağı rahatsız etmediğine ve kanülü yerine iyice sabitlediğine dikkat edilmelidir.

Yetişkin modelinde;

X şeklindeki sabitleme kollarının arkada birbirine iyice sabitlendiğine, keza orta kısımda bulunan ve kanülü sabitleyen velkro aksesuarın da kanülü iyice kavradığına dikkat edilmelidir

Ambalaj şekli:

Bir poşette bir ürün vardır , 25 adetlik kutular halinde satışa sunulmaktadır.