

ÜRÜN TANITIM KARTI

**Adı:**

Schützermed

Tanımı:

Göz Koruma Bandı

Kullanıldığı alanlar:

Yoğun bakım bölümlerinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Hastaların gözlerini UV ışıktan veya ortam ışığından korumak için kullanılır.

Fonksiyonu:

Bant hastanın gözünün üzerine gelerek bünyesindeki karbon içerikli köpük* sayesinde başta UV ışın olmak üzere her türlü ortam ışığının geçişini engelleyerek gözleri korur.

(Karbon içerikli köpük * Yapısında karbon taşıyan siyah renkte sünger) .

Teknik özellikleri:

Band -göz deliği olmayan- bir maske şeklindedir.

Birbirine lamine* edilmiş3 tabakadan meydana gelmiştir.

En üstteki tabaka şardonlanmış *(tüylendirilmiş) kumaştan oluşmuştur. Bu tüycükler velcro ***sabitleme parçacıklarının bandı güvenle sabitlemesini sağlarlar.

Orta kısımda banda yumuşaklık sağlayan sünger tabaka vardır.

Band her ölçüde kafaya uygulanabilmesi için ayarlanabilir elastik bağlantı elemanlarına sahiptir.

Ürün tek kullanımlıktır ve Gama Işını ile sterilize edilmiştir.

(Lamine etmek*: (Laminasyon) Farklı malzemelerin ısı altında veya yapıştırıcı madde desteği ile özel yöntemler ve aparatlar kullanılarak birbirine yapıştırılıp tek parça haline getirilme işlemi).

(Şardonlamak:**Penye, pamuklu veya sentetik kumaşların yüzeylerinin özel bir metot ile tüylendirme işlemi,şardonlanmış kumaş ise bir yüzeyi tüylendirilerek yumuşak ve kadifemsi veya havlumsu hale getirilmiş kumaş)

(Velkro*:** Çıt çıt veya düğme yerine kullanılan,üzerinde mikro düzeyde plastik kancacıklar olan ve bu mikro kancalar ile tüylü yüzeylere yapışan özel kumaş -cırtlı kumaş).

Modeli / Kodu / Ölçüleri



Ürün tek modeldir.

Kodu: PEB 304

20 cm boyunda tek ebattır.

Kullanımı:

Koruyucu gözlüğü gözüne yerleştirin.

Burun üzerine gelen kısmı içeriye doğru katlayarak yüzün altından gelebilecek ışığı kesin.

Gözlüğün iki sıra elastik bağlantı elemanlarını başın arkasına getirin,gereken ayarlamayı yaparak başa sabitleyin .

Dikkat edilecek hususlar

Bandın göz hizasında olduğuna, gözleri iyice örttüğüne, yerinden kaymayacak şekilde güvenle sabitlendiğine,hastanın başını sıkmadığına dikkat ediniz.

Ambalaj şekli:

Bir poşette bir ürün vardır , 25 adetlik kutular halinde satışa sunulmaktadır.