

ÜRÜN TANITIM KARTI



Adı:

Traegermed

Tanımı:

Trakiyel Kanül Sabitleme Bandı

Kullanıldığı alanlar:

Yoğun Bakım bölümlerinde tedavi gören hastalarda ve ayrıca nekahat devresindeki ayaktaki hastalarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Hastanın gırtlığına takılan trakiyel kanülün (tüpün) yerinden çıkmasını veya düşmesini önlemek ve kanüle destek vermek için kullanılır.

Fonksiyonu:

Bant trakiyel kanülün yanlarındaki kulakçıklardan geçerek kanülü kavrar ve hastanın gırtlığında sabit tutar.

Teknik özellikleri:

Sünger destekli sabitleme bantları ve velür destekli sabitleme bantları olarak iki farklı yapıdadır.

Sünger destekli sabitleme bantlarında ; bandın orta katmanındaki sünger tabaka kullanıcıya esneklik ve yumuşaklık sağlar.

Velur Destekli Rijit Sabitleme Bantları esnemez ve kanülü ilk konumunda sabitler.

Ürün tek parçalı ve iki parçalı olmak üzere iki tiptir (bkz. Model ve ölçüler başlığına).

Şerit görünüşündeki her iki tip bandın da uçlarında bandı hastanın boynuna sabitlemeye yarayan velkro* 'dan mamul sabitleme aksesuarı mevcuttur.

Bant birbirine lamine** edilmiş 3 tabakadan meydana gelmiştir.

En üstteki tabaka şardonlanmış ***(tüylendirilmiş) kumaştan oluşmuştur.

Bu tüycükler velkro sabitleme parçacıklarının bandı güvenle sabitlemesini sağlarlar.

Sünger destekli bantta :Orta kısımda banda yumuşaklık sağlayan sünger tabaka vardır ve bandın cilde temas eden en alt tabakası ise pamuklu penye kumaştandır

Velür destekli bantta: Orta kısımda banda yumuşaklık rijit yapı sağlayan dayanıklı kumaş alt ve üst kısımda ise şardonlanmış kumaş vardır.

Ürün tek kullanımlıktır ve Gama Işını ile sterilize edilmiştir.

(**Velkro***: Çıt çıt veya düğme yerine kullanılan, üzerinde mikro düzeyde plastik kancacıklar olan ve bu mikro kancalar ile tüylü yüzeylere yapışan özel kumaş -cırtlı kumaş).

(**Lamine etmek****: (Laminasyon) Farklı malzemelerin ısı altında veya yapıştırıcı madde desteği ile özel yöntemler ve aparatlar kullanılarak birbirine yapıştırılıp tek parça haline getirilme işlemi).

(**Şardonlamak***** :Penye, pamuklu veya sentetik kumaşların yüzeylerinin özel bir metot ile tüylendirme işlemi,şardonlanmış kumaş ise bir yüzeyi tüylendirilerek yumuşak ve kadifemsi veya havlumsu hale getirilmiş kumaş)

Modeli / Kodu / Ölçüleri

Tek parçalı ve iki parçalı olmak üzere 2 farklı modeldedir.

Tek parçalı model;



Küçük ,orta ve büyük olmak üzere 3 farklı ebattadır.

Kodu;

TCHR 01 Küçük

TCHR 02 Orta


TCHR 03 Büyük

Küçük boy 23 x 3,2 cm ,orta boy 44 x 3,5 cm büyük boy 56 x 3,5 cm ebatlarındadır,tümünün kalınlığı da cm dir..

İki parçalı model;



Rijit

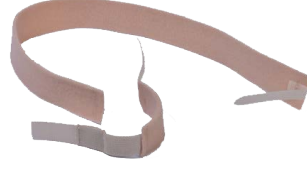

Soft

İki parçalı model ise tek boydur.

Kodu; TCH TP

Kısa ve uzun iki parçanın uzunlukları 36 ve 6 cm ,genişlikleri 2,5 cm kalınlıkları ise cm dir.

Kullanımı:

Tek parçalı bant da;

Kanul gırtlaktaki deliğine yerleştirilir

Band boynun arkasına yerleştirilerek her iki ucu öne doğru getirilir

Bandın velkro takılı olan her iki ucu kanulün kulakçıklarından geçirilir ve cırtlara bandın üzerindeki tüylü yüzeye iliştirilerek sabitlenir.

İki parçalı bant da;

Kanul gırtlaktaki deliğine yerleştirilir

Bandın uzun parçası boyna yerleştirilerek uçları öne doğru getirilir

Uzun parçasının bir ucuna takılı bulunan velkro kilit trakiyel kanulün bir kulakçığından geçirilerek bandın üzerine sabitlenir.

Kısa parçasının bir ucu da trakiyel kanulün diğer kulakçığından geçirilir ve yine uzun parçasının üzerine sabitlenir

Dikkat edilecek hususlar:

Tek parçalı modelde bandın her iki ucunun birbirine iyice sabitlendiğine, keza iki parçalı modelde bandın kısa parçasının uzun parçasının üzerine iyice sabitlendiğine dikkat edilmelidir.

Bandın kanulü iyice kavradığına ve gevşek olmadığına dikkat edilmelidir.

Ambalaj şekli:

Bir poşette bir ürün vardır , 25 adetlik kutular halinde satışa sunulmaktadır.