


KULLANIM METODU

ASMED


**KASIK DESTEK BANDI
ANGIO SUPPORT BAND**

KASIK DESTEK BANDI


MODEL : STANDART
REF. NO : ASBR-ASBL

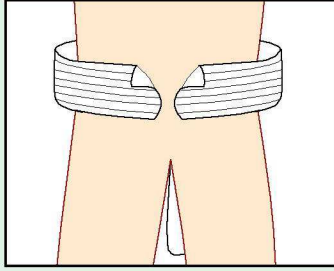


Bandın uzun kısmını kısa kısmı arkadan sarkacak şekilde bele sarın

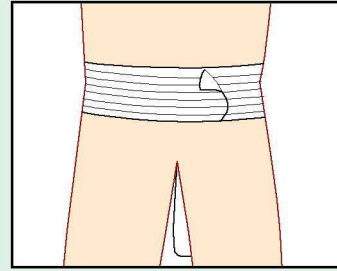

Velkro cırt ile bele sabitleyin

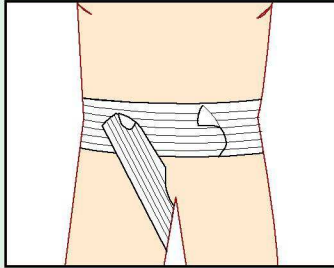

Aşağıya sarkan kısa kısmını ise arkadan öne doğru bacak arasından getirin ve bele sarılı olan kısmın üstüne velkro cırt ile sabitleyin

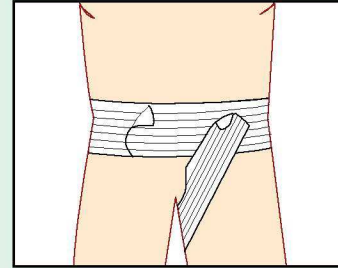

▷ Gama ışını ile sterilize edilmiş

▷ Tekrar sterilize edilmez

▷  Tek kullanımlık

▷ Yırtık ve delik poşetleri kullanmayınız