


KULLANIM METODU


BIANDERMED®

BEBEK EL/AYAK SABİTLEME BANDI


MODEL : STANDART
REF. NO : BLH 3001

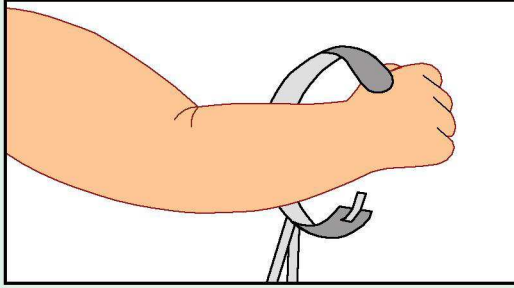


Bandı bileğe yerleştirin

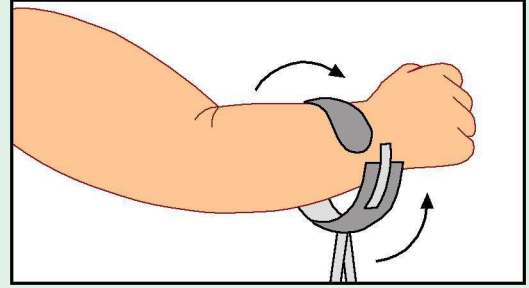

Kan dolaşımını engellemeyecek şekilde bileğe sarın

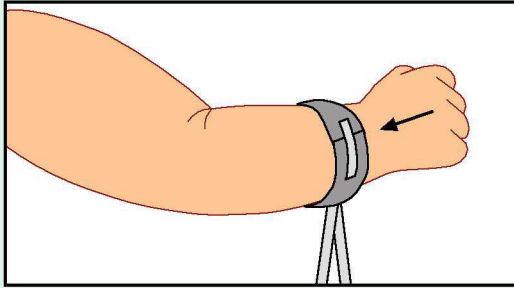

Bandın bir ucundaki velkro kilidi bandın tüylü yüzeyine iliştin

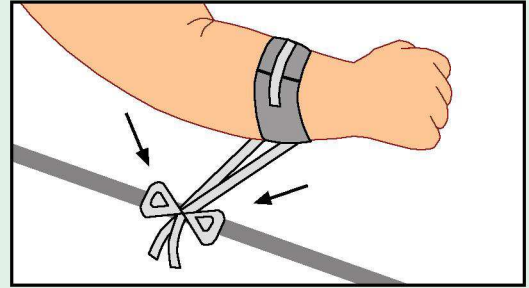

Bandın kordonlarını sabit bir noktaya bağlayarak hareketi sınırlandırın



▷ Gama ışını ile sterilize edilmiş

▷  Tek kullanımlık

▷ Tekrar sterilize edilmez

▷ Yırtık ve delik poşetleri kullanmayınız