


KULLANIM METODU

CLAMPMED


İDRAR KONTROL KLEMPİ

MODEL : NORMAL - BÜYÜK


REF. NO : UCC 01 - UCC 02

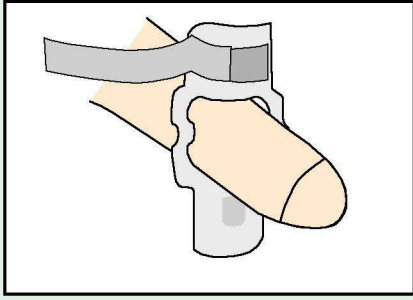


Kontrol klempini şeritli kısmı üste gelecek şekilde sertleşmemiş haldeki penise takın

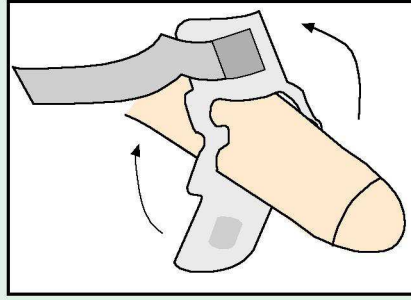


Klempı katlayarak penisi sıkıştırın

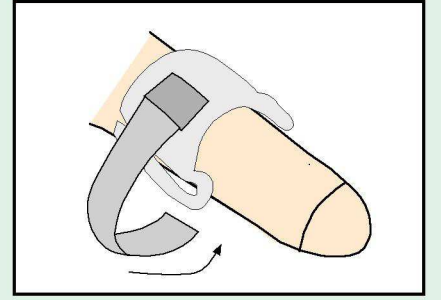

Bandı klempe dolayarak kısılcacın açılmasını önleyin

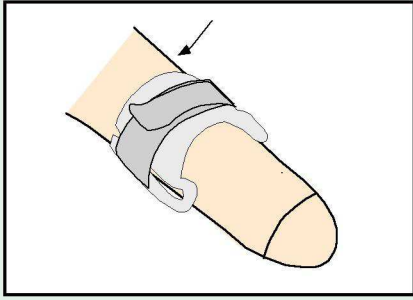

Klempin kan dolaşımını engellemediğinden emin olun

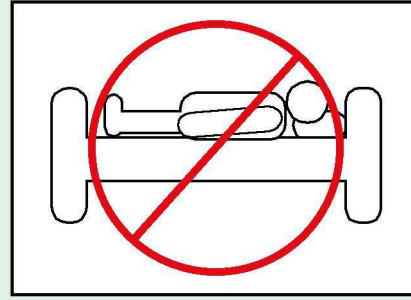

Uyku esnasında kullanmayın



Klempı kullanarak idrarınızı biriktirmeyin. Hissettiğinizde en kısa sürede boşaltımınızı yapın

Klempı mutlaka doktor kontrolünde kullanın. Klemp sadece idrar kaçırmayı ve damlamayı önlemek içindir. Klempı kullanmadan önce vücudun idrar boşaltma periyodunu tespit edin ve idrarınızı minimum bu periyotlarda boşaltın.



▷ Gama ışını ile sterilize edilmiş

▷  Tek kullanımlık

▷ Tekrar sterilize edilmez

▷ Yırtık ve delik poşetleri kullanmayınız