


KULLANIM METODU


CONDOFIX

İDRAR SONDASI SABİTLEME BANDI


MODEL :STANDART
REF. NO : CF 8001

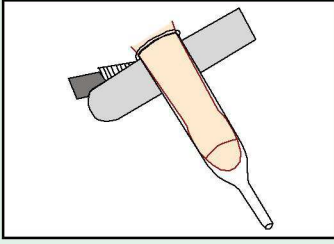


Bandı prezervatifin kenarına gelecek şekilde (sertleşmemiş haldeki) penisin altına yerleştirin

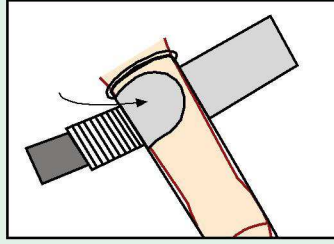


Oval ucunu prezervatife sarın

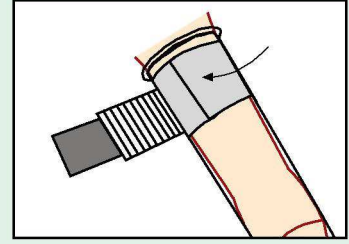

Düz ucunu da oval ucun üzerine gelecek şekilde sarın

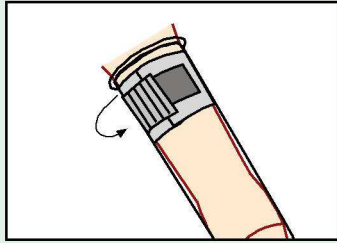

Lastik şeridi esneterek velkro parçayı (cırt parçayı) bandın üzerine iliştirin

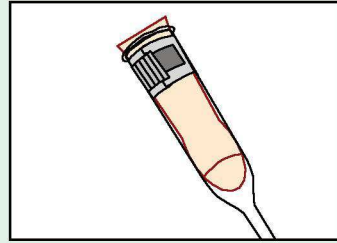

Bandın kan dolaşımını engellemediğinden emin olun



▷ Steril değildir

▷ 30° de yıkanabilir

▷ Lateks yoktur