


KULLANIM METODU

DEKELMED®


KULAK DESTEK BANDI

MODEL : COCUK - YETİŞKİN


REF. NO : EPH 7001 - EPH 7002

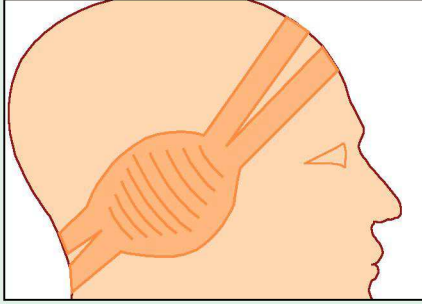

Bandın geniş kısmını kulağın üzerine yerleştirin

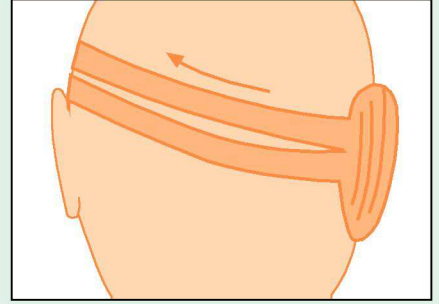

Bandın uzun uçlarını başın arkasından dolayın

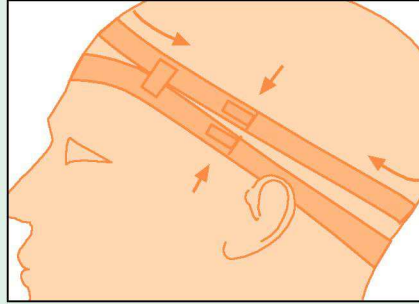

Dolanın uçları bandın kısa uçlarına velkro parçaları ile irtibatlandırın



▷ Gama ışını ile sterilize edilmiş

▷  Tek kullanımlık

▷ Tekrar sterilize edilmez

▷ Yırtık ve delik poşetleri kullanmayınız