


KULLANIM METODU


FIXELMED®

İDRAR TORBASI SABİTLEME BANDI


MODEL : STANDART
REF. NO : UBH 1001

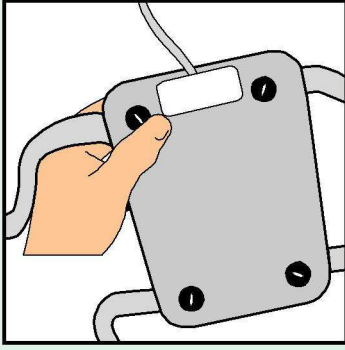


Elastik bandın düğmelerini idrar torbasının deliklerine ilikleyin

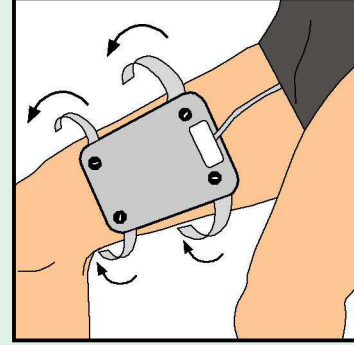

Torbayı bacağına yerleştirin ve bandları bacağına sarın

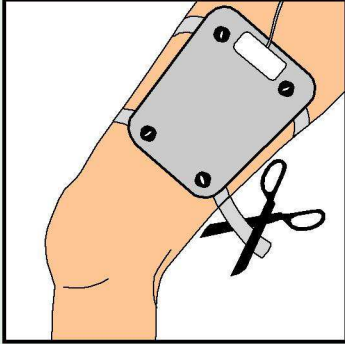

Bandların ucundaki velkro kilitleri bandların tüylü yüzlerine yapıştırın ve fazlalıkları kesin

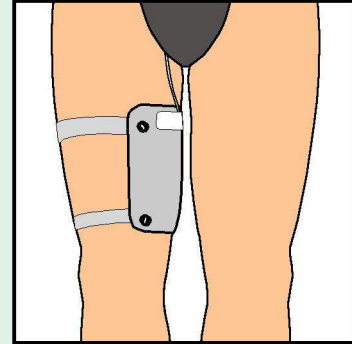

Torbayı en rahat edeceğiniz konuma getirin



▷ Steril değildir

▷ 30° de yıkanabilir

▷ Lateks yoktur