


KULLANIM METODU


FIXERMED

İDRAR SONDASI SABİTLEME BANDI


MODEL :STANDART
REF. NO : CH 4001

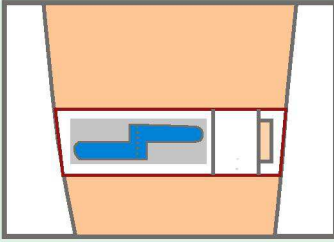


Elastik bandı bacağına sarın ve velcro ile sabitleyin

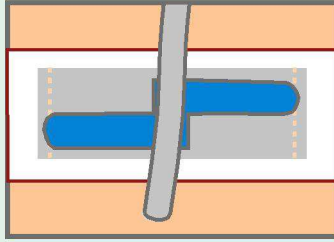


Sondayı velcro kilidin ortasına yerleştirin

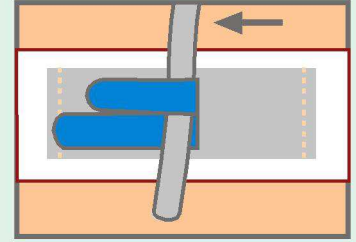


Kilidin bir parçasını sondanın üzerinden geçirin ve tüylü yüzeye sabitleyin

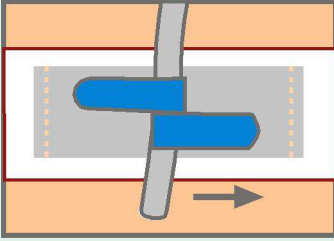

Diğer parçayı da aynı şekilde sabitleyin

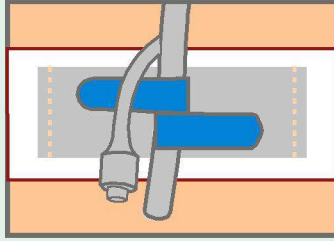

Sondanın hareket etmediğini kontrol edin

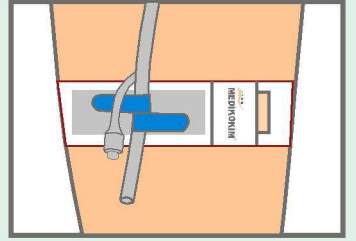

Bandı rahat edeceğiniz konuma getirin.



▷ Steril değildir

▷ 30° de yıkanabilir

▷ Lateks yoktur