



MEDIKOKIM®

SAFEBELT®

Hasta Güvenlik Kemerleri
Çelik Kilitli Seri Sandalye Bel Sabitleme Kemerini
Kullanma Kılavuzu



CE

Genel Bilgiler

Safebelt iskemle Bel Kemerini hastayı etkin bir biçimde tekerlekli iskemleye veya koltuğa sabitlemek için tasarlanmıştır ve kaymasını engeller.

Şayet hastanın aşağı doğru kayma ihtimali varsa bel kemeri yerine omuz destek kemeri

kullanılır.

Standart Aksesuarları: Plastik buton ve çelik pim' den oluşan kilit ve manyetik anahtar.

Opsiyonlu Aksesuarları: Standart Uzatma Kemerini, Kasık Destek Kemerini.

Safebelt® Hasta Kemerleri Genel Uyarılar

- Hastanın güvenliği ve konforu ürünlerin doğru kullanılmasına ve montajına bağlıdır. Hastanın güvenliği için uygulamadan önce kullanım talimatını dikkatlice okuyunuz. Kullanma kılavuzunu okumadan ürünü kullanmayınız.
- Hasarlı malzemeler kullanıcı açısından risk, hasta açısından ise rahatsızlık oluşturur. Bu nedenle kullanmadan önce malzemelerin hasarsız ve eksiksiz olduğunu kontrol ediniz. Hasarlı ve yırtık ürün kullanmayınız.
- Hastaya tatbik etmeden önce ürünleri mutlaka (iskemlede koltukta vb.) deneyiniz, monte ediniz ve sökünüz, deneyim kazanınız.
- Anahtar ve kilitlerin birbiri ile uyumlu olduğunu kilidin güvenle kilitlendiğini ve kilidin manyetik anahtarı ile rahatça ve çabucak açılabilirdiğini önceden kontrol ediniz.
- Anahtarları kolayca ulaşabileceğiniz noktalarda saklayınız, yerini unutmayınız.

nız. Anahtara ulaşamadığınız acil durumlarda kemerleri kesmekte tereddüt etmeyiniz.

- Kilitlemenin güvenliği için üst üste en fazla 4 kat malzemeyi kilitleyiniz.
- Bu tür kısıtlamalar hastayı huzursuz edebileceğinden kemerleri kullanan hastaları düzenli olarak izleyiniz ve kontrol ediniz.
- Çok uzun süreli hareketsizliğin hastada kas atrofisi ve pıhtı oluşumuna katkı yapabileceğini unutmayınız.
- Ürünlerin kullanım esnasında nefes alıp vermeye veya kan dolaşımına engel olmadığına emin olunuz.
- Ürünlerimiz antialerjik ve soft materyallerden üretilmiştir. Buna rağmen çok uzun süreli kullanımlarda veya çok hassas cilde sahip hastalarda cilde zarar vermediğinden emin olunuz.
- Medikokim Safebelt® ürünlerinde daima orijinal kilit, pimi, anahtar ve yedek parça kullanınız.

Kullanımı

Çelik pimli kilidin kapatılması ve manyetik anahtar yardımı ile açılması

Kapatılması: Kilidin çelik pimi kırmızı renkli kilit butonunun içine sokulur ve ileri itilip yerine oturtularak kilitlenir. Kilit kapağında hafifçe bir tık sesi duyulur ve pim geri çekildiğinde butondan çıkmaz.

Açılması: Manyetik anahtarın metal yüzü kırmızı kilit butonunun üst yüzeyine iyice temas ettirilip ve aynı anda çelik pim hafifçe döndürülerek geri çekilir ve kilit açılır.

Kemerin uygulanması

- Hastayı tekerlekli iskemleye veya sallandığında devrilmeyecek dengeye sahip bir koltuğa oturtunuz.
- Kemerini önden arkaya doğru hastanın beline sarınız (Bkz Resim 1) ve iki ucunu gergin olacak şekilde iskemlenin (veya koltuğun) arkasına getiriniz. (Bkz. Resim 2)

- Arkaya getirilen uçları üst üste getiriniz ve çelik kilitlerin pimini kemerin karşılıklı (üst üste) gelen iki deliğinden geçirerek kilidin plastik buton kısmının içine yerleştirip kilitleyiniz. (Bkz. Resim 3)
- Kemerini hastanın bel hizasında olduğunu ve kaymasını engellediğini kontrol ediniz.



Resim 1



Resim 2



Resim 3



Resim 4

İskemle Bel Kemerinin boyunun uzatılması

Çok iri gövdeli veya şişman hastalar için kemerin boyunu uzatmak gerekebilir. Bunun için Standart Uzatma Kemerini bel


kemerinin herhangi bir ucuna yine çelik anahtarı kullanmak suretiyle ekleyiniz. (Bkz. Resim 4)

İskelele Bel Kemerinin Kasık Destek Kemerini ile birlikte kullanımı

- 1 Kemerden kurtulmak için kendini aşağıya doğru iten hastaların hareketini engellemek için İskelele Bel Kemerini Kasık Destek Kemerini ile beraber kullanılır.
- 2 Bunun için Kasık Destek Kemerini'nin dar olan ucunu (halka biçiminde uzantısı olan ucunu) iskemlenin arkasında bel kemerinin tam orta hizasına getiriniz. Daha sonra kemerin kalın kısmını bu halkanın içinden geçirip (Bkz. Resim 5) sonuna kadar çekerek (Bkz. Resim 6) kasık kemerini bel kemerine sabitleyiniz. (Bkz. Resim 7)
- 3 Kasık kemerini arkadan öne doğru hastanın bacak arasından geçirerek öne, bel kemerinin üzerine getiriniz, yeteri sıkılıkta olduğunu kontrol ettikten sonra çelik kilidi kullanmak sureti ile bel kemerini üzerine sabitleyiniz. (Bkz. Resim 8)




Resim 5

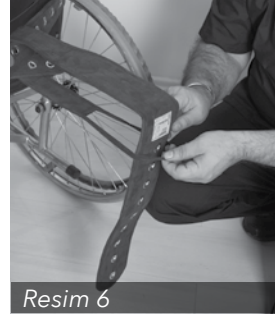

Resim 6



Resim 7

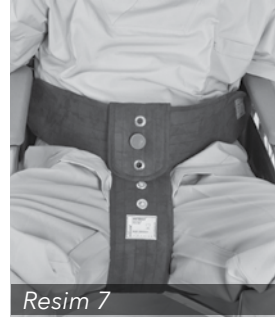

Resim 7



Özel Uyarılar

- 1 Kemerin hastanın nefes almasına engel olmadığını ve kan dolaşımına zarar vermediğini kontrol ediniz. (Bkz. Resim 8)
- 2 Bel Kemerini asla göğüs (göğüs kafesi) üzerinde kullanmayınız. (Bkz. Resim 9)



Resim 8



Resim 9



Ürün Temizliği ve Ömrü

- 1 Ürünü çamaşır makinesinde ve kişisel giysi temizliğinde kullanılan temizlik maddeleri ile yıkayınız. Sanayi deterjanı, klor ve çamaşır suyu benzeri ağartıcı maddelerle temizlemeyiniz.
- 2 Maksimum 95 °C'de suyla yıkayınız.
- 3 Kurutucuda veya açık havada kurutunuz. Kurutucuda kurutulurken düşük ısıda kurutulması kullanım ömrünü arttırır
- 4 Ürünü ütlemeyiniz.

Medikokim Tıbbi Kimyevi Malzeme San. Tic. Ltd. Şti

İkitelli O.S.B. Demirciler Sanayi Sitesi B/7 Blok No:157 Başakşehir PK 34306 İstanbul / TÜRKİYE
Tel: 0212 549 57 78 • Fax: 0212 549 57 79 • E-Posta: info@medikokim.com • www.medikokim.com