



**MEDIKOKIM®**

**SAFEBELT®**

Hasta Destek Kemerleri  
Hasta Kaldırma Kemerleri  
Kullanma Kılavuzu



CE



## Genel Bilgiler

- Kemer özellikle sandalyede veya yatakta oturur pozisyondan ayağa kalkarken destek ihtiyacı duyan hastalara yardımcı olunması amacı ile düşünülmüştür.
- Hastaya bel hizasından destek vererek kalkmasına yardımcı olur.
- Esnek ve yumuşak yapısı sayesinde bedene zarar vermez.



## Safebelt® Hasta Kemerleri Genel Uyarılar

- Hastanın güvenliği ve konforu ürünlerin doğru kullanılmasına ve montajına bağlıdır. Hastanın güvenliği için uygulamadan önce kullanım talimatını dikkatlice okuyunuz, kullanma kılavuzunu okumadan ürünü kullanmayınız.
- Hasarlı malzemeler kullanıcı açısından risk, hasta açısından ise rahatsızlık oluşturur. Bu nedenle kullanmadan önce malzemelerin hasarsız ve eksiksiz olduğunu kontrol ediniz. Hasarlı ve yırtık ürün kullanmayınız.



## Ürün Temizliği ve Ömrü

- Ürünü çamaşır makinesinde ve kişisel giysi temizliğinde kullanılan temizlik maddeleri ile yıkayınız, sanayi deterjanı, klor ve çamaşır suyu benzeri ağartıcı maddelerle temizlemeyiniz.
- Maksimum 35 °C'de suyla yıkayınız.
- Kurutucuda veya açık havada kurutunuz. Kurutucuda kurutulurken düşük ısıda kurutulması kullanım ömrünü arttırır
- Ürünü ütlemeyiniz.




## Kullanımı

- Kemer hastanın beline yerleştiriniz. (Bkz Resim 1)



Resim 1

- Hastanın kollarını omuzunuza yerleştiriniz. (Bkz. Resim 2)

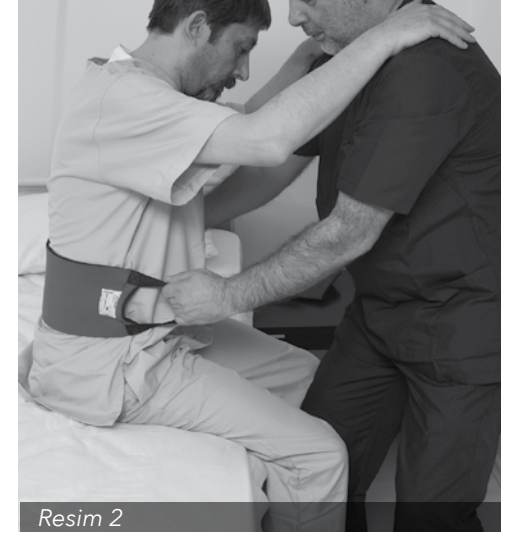


Resim 2

- Kollarınızı gererek gövdenizi arkaya doğru bırakarak ağırlığınız vasıtasıyla hastayı kendiniz çekiniz. (Bkz. Resim 3)



Resim 3

- Aynı anda hastanın ayakları üzerinde doğrulmasını sağlayınız. (Bkz Resim 4)

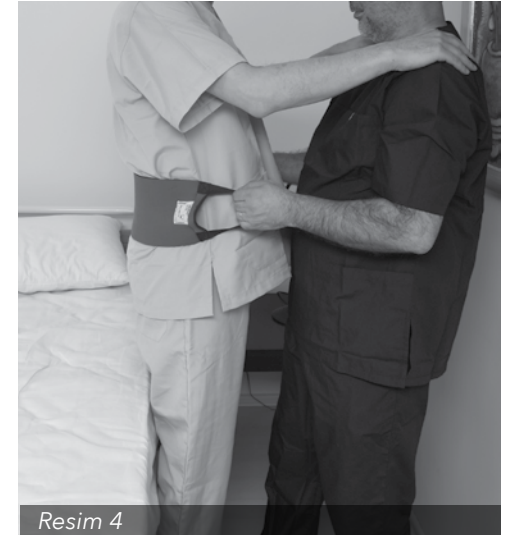

Resim 4

# SAFEBELT®

Hasta Destek Kemerleri  
Hasta Kaldırma Kemerini



Medikokim Tıbbi Kimyevi Malzeme San. Tic. Ltd. Şti

İkitelli O.S.B. Demirciler Sanayi Sitesi B/7 Blok No:157 Başakşehir PK 34306 İstanbul / TÜRKİYE  
Tel: 0212 549 57 78 • Fax: 0212 549 57 79 • E-Posta: info@medikokim.com • www.medikokim.com