



MEDİKOKİM®

SAFEBELT®

Hasta Güvenlik Kemerleri
Çelik Kilitli Seri Hasta Transfer Kemerleri
Kullanma Kılavuzu



CE

Genel Bilgiler

Safebelt® Hasta Transfer Kemerleri hastanın bir yerden başka yere sedye veya yatak gibi benzeri araçlara bağlı olmadan nakli sırasında (başka bir ifade ile yürüyerek veya bir taşıtta oturarak nakli sırasında) el ve ayak bileklerini (kollarını ve bacaklarını) etkin bir biçimde

kontrol etmek ve çevreye zarar vermeden götürülmesini sağlamak için kullanılır.

Standart Aksesuarları: Plastik buton ve çelik pim'den oluşan kilit ve manyetik anahtar ve el ve ayak kemerleri arasındaki bağlantı kemeri.

Genel Uyarılar

- 1 Hastanın güvenliği ve konforu ürünlerin doğru kullanılmasına ve montajına bağlıdır. Hastanın güvenliği için uygulamadan önce kullanım talimatını dikkatlice okuyunuz, kullanma kılavuzunu okumadan ürünü kullanmayınız.
- 2 Hasarlı malzemeler kullanıcı açısından risk, hasta açısından ise rahatsızlık oluşturur. Bu nedenle kullanmadan önce malzemelerin hasarsız ve eksiksiz olduğunu kontrol ediniz. Hasarlı ve yırtık ürün kullanmayınız.
- 3 Krizde zaman çok önemlidir. Kriz anındaki bir hastaya ürünün tatbikindeki başarı hastanın direnme gücüne, uygulayan personelin deneyimine ve sayısına bağlıdır Bu nedenle hastaya tatbik etmeden önce ürünleri mutlaka (yatakta ve iskemlede vb.) deneyiniz, monte ediniz ve sökünüz, deneyim kazanınız.
- 4 Anahtar ve kilitlerin birbiri ile uyumlu olduğunu kilidin güvenle kilitlendiğini ve kilidin manyetik anahtarı ile rahatça ve çabucak açılabilirliğini önceden kontrol ediniz.
- 5 Anahtarları kolayca ulaşabileceğiniz noktalarda saklayınız, yerini unutmayınız. Anahtara ulaşamadığınız acil durumlarda kemerleri

kesmekte tereddüt etmeyiniz.

- 6 Kilitlemenin güvenliği için üst üste en fazla 4 kat malzemeyi kilitleyiniz.
- 7 Bu tür kısıtlamalar hastayı huzursuz edebileceğinden kemerleri kullanan hastaları düzenli olarak izleyiniz ve kontrol ediniz. Çok uzun süre yalnız bırakmayınız.
- 8 Çok uzun süreli hareketsizliğin hastada kas atrofisi ve pıhtı oluşumuna katkı yapabileceğini unutmayınız.
- 9 Ürünlerin kullanım esnasında nefes alıp vermeye veya kan dolaşımına engel olmadığına emin olunuz.
- 10 Ürünlerimiz antialerjik ve soft materyallerden üretilmiştir. Buna rağmen çok uzun süreli kullanımlarda veya çok hassas cilde sahip hastalarda cilde zarar vermediğinden emin olunuz.
- 11 Kullanım esnasında hastanın üzerindeki (mücevher, saat, gözlük vb.) yaralanmaya neden olabilecek tüm nesnelere çıkartınız.
- 12 Medikokim Safebelt® ürünlerinde daima orijinal kilit, pim, anahtar ve yedek parça kullanınız.

Açılması: Manyetik anahtarın metal yüzü kırmızı kilit butonunun içine sokulur ve ileri itilip yerine oturtularak kilitlenir. Kilit kapağında hafifçe bir tık sesi duyulur ve pim geri çekildiğinde butondan çıkmaz.

Kullanımı

Çelik pimli kilidin kapatılması ve manyetik anahtar yardımı ile açılması

Kapatılması: Kilidin çelik pimi kırmızı renkli kilit butonunun içine sokulur ve ileri itilip yerine oturtularak kilitlenir. Kilit kapağında hafifçe bir tık sesi duyulur ve pim geri çekildiğinde butondan çıkmaz.

Kol Sabitleme Kemerini'nin uygulanması

- 1 Kemerini hastanın bel hizasında ve bilek sabitleme kemerleri her iki yana gelecek şekilde hastanın beline sarınız sabitleyiniz. (Bkz. Resim 1)
- 2 Bunun için kemerini bele dolayınız, el bileği sabitleme kısımlarını hastanın soluna ve sağına gelecek şekilde hizalayınız. Daha sonra kemerin iki ucunu arkada birleştirerek çelik kilidi karşılıklı (üst üste) gelen iki deliğinden geçirerek kilidin plastik butonunun içine yerleştirip kemerini kilitleyiniz. (Bkz. Resim 2)
- 3 Daha sonra kemerin bilek sabitleme kısmını hastanın bileğine sarınız ve velcro kilit ile sabitleyiniz. (Bkz. Resim 3) Kemerin ucunu çelik kancadan geçirerek ters yöne getiriniz. ve çelik kilidin pimini önce kemerin alt tarafında kalan delikten daha sonra aynı hizada üste gelen deliğinden geçiriniz ve kilidin kırmızı plastik butonunu pimin üzerine oturtunuz. (Pimi plastik butonun içine yerleştiriniz.) (Bkz. Resim 4)
- 4 Aynı işlemi diğer kol için de uygulayınız.



Yürüme Kısıtlama Kemerini'nin uygulanması

- 1 Kemerini hastanın iki ayak bileğine sabitleyiniz. (Bkz. Resim 5)
- 2 Bunun için kemerin bilek sabitleme kısmını hastanın ayak bileğine sarınız, çelik kancadan geçirerek ters yöne getiriniz ve çelik kilidin pimini önce kemerin alt tarafında kalan delikten daha sonra aynı hizada üste gelen deliğinden geçiriniz ve kilidin kırmızı plastik butonunu pimin üzerine oturtunuz. (Pimi plastik butonun içine yerleştiriniz.) (Bkz. Resim 6)
- 3 Aynı işlemi diğer bilek için de uygulayınız.



Kemerlerin birbiriyle irtibatlandırılması

- 1 Bağlantı kemerinin bir ucunu Yürüme Kısıtlama Kemerinin ortasına getirin ve üst üste gelen iki delikten çelik pimi geçirmek suretiyle sabitleyiniz. (Bkz. Resim 7)
- 2 Daha sonra kemerin diğer ucunu hastanın beline sarılmış olan kemerin içinden geçirerek yukarı çekiniz ve ters yöndeki delik üst üste gelecek şekilde hizalayıp çelik pimi deliklerden geçirerek sabitleyiniz. (Bkz. Resim 8)



Resim 7




Resim 8



Özel Uyarılar

- 1 Kemerlerin hastanın kan dolaşımına zarar vermediğini kontrol ediniz. (Bkz. Resim 9)
- 2 Kemerin karyolanın hastaya göre hareket edebilen kısmına bağlı olduğuna ve karyolanın olası pozisyon değiştirme hareketinde kemerlerin gerilerek hastaya zarar vermeyeceğinden emin olunuz.

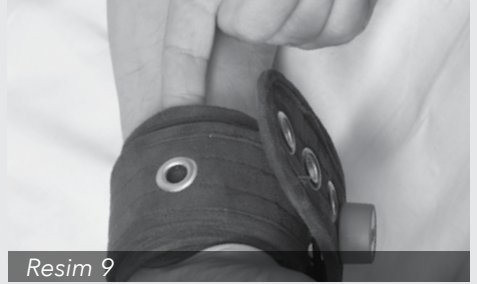

Resim 9



Ürün Temizliği ve Ömrü

- 1 Yıkamadan önce kemerler üzerindeki kilit sistemlerini çıkarınız.
- 2 Ürünleri çamaşır makinesinde ve kişisel giysi temizliğinde kullanılan temizlik maddeleri ile yıkayınız. Sanayi deterjanı, klor ve çamaşır suyu benzeri ağartıcı maddelerle temizlemeyiniz.
- 3 Maksimum 95 °C'de suyla yıkayınız.
- 4 Yıkama esnasında velkro kilitlerde iplenme tiftiklenmeyi önlemek için velkro kilitleri kapalı halde yıkayınız.
- 5 Ürünleri ütölemeyiniz.
- 6 Kurutucuda veya açık havada kurutunuz. Kurutucuda kurutulurken düşük ısıda kurutulması kullanım ömrünü artırır.
- 7 Kilitleri ucu pamuklu çubuk ile dezenfektan kullanarak temizleyiniz.
- 8 Kilitlerin içine su kaçırmayınız. İçine su kaçan kilitleri iyice kurumadan kullanmayınız. Kullanımdan evvel güvenliğini kontrol ediniz.
- 9 Velkro kilitlerde ipliklenme ve tiftiklenme olduğunda, rahat kapanması için mekanik olarak temizleyiniz.