



# KULLANIM METODU

## MITTMED® PARMAK KONTROL ELDİVENİ


MODEL : STANDART  
REF. NO : FC 101

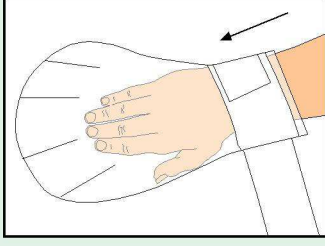


Eldiveni hastanın eline giydirin

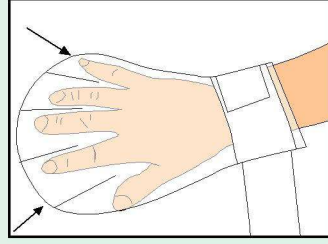

Parmakların her birini bir bölüme yerleştirin

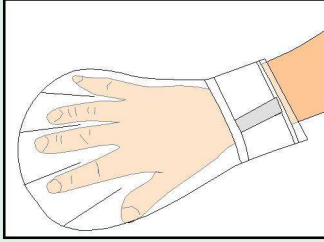

Bilek bandajını tokasından geçirerek bileğe sarın ve sabitleyin

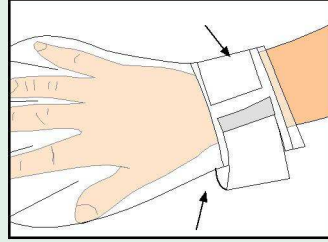

Bandın kan dolaşımını engellemediğini kontrol edin



▷ Gama ışını ile sterilize edilmiş

▷  Tek kullanımlık

▷ Tekrar sterilize edilmez

▷ Yırtık ve delik poşetleri kullanmayınız