



MEDİKOKİM®

SAFEBELT®

Hasta Güvenlik Kemerleri
Çelik Kilitli Seri Sandalye Gövde Sabitleme Kemerleri
Kullanma Kılavuzu



CE

Genel Bilgiler

Safebelt İskemle Omuz Sabitleme Kemerini hastayı etkin bir biçimde tekerlekli iskemle veya koltuğa sabitleyebilir, kalkmasını ve aşağı doğru kaymasını engeller.

Standart Aksesuarları: Plastik buton ve çelik pim'den oluşan kilit ve manyetik anahtar.

Safebelt® Hasta Kemerleri Genel Uyarılar

- Hastanın güvenliği ve konforu ürünlerin doğru kullanılmasına ve montajına bağlıdır. Hastanın güvenliği için uygulamadan önce kullanım talimatını dikkatlice okuyunuz, kullanma kılavuzunu okumadan ürünü kullanmayınız.
- Hasarlı malzemeler kullanıcı açısından risk, hasta açısından ise rahatsızlık oluşturur. Bu nedenle kullanmadan önce malzemelerin hasarsız ve eksiksiz olduğunu kontrol ediniz. Hasarlı ve yırtık ürün kullanmayınız.
- Hastaya tatbik etmeden önce ürünleri mutlaka (iskemlede koltukta vb.) deneyiniz, monte ediniz ve sökünüz, deneyim kazanınız.
- Anahtar ve kilitlerin birbiri ile uyumlu olduğunu kilidin güvenli kilitlendiğini ve kilidin manyetik anahtarı ile rahatça ve çabucak açılabilirdiğini önceden kontrol ediniz.
- Anahtarları kolayca ulaşabileceğiniz noktalarda saklayınız, yerini unutmayınız.
- Anahtara ulaşamadığınız acil durumlarda kemerleri kesmekte tereddüt etmeyiniz.
- Kilitlemenin güvenliği için üst üste en fazla 4 kat malzemeyi kilitleyiniz.
- Bu tür kısıtlamalar hastayı huzursuz edebileceğinden kemerleri kullanan hastaları düzenli olarak izleyiniz ve kontrol ediniz.
- Çok uzun süreli hareketsizliğin hastada kas atrofisi ve pıhtı oluşumuna katkı yapabileceğini unutmayınız.
- Ürünlerin kullanım esnasında nefes alıp vermeye veya kan dolaşımına engel olmadığını emin olunuz.
- Ürünlerimiz antialerjik ve soft materyallerden üretilmiştir. Buna rağmen çok uzun süreli kullanımlarda veya çok hassas cilde sahip hastalarda cilde zarar vermediğinden emin olunuz.
- Medikokim Safebelt® ürünlerinde daima orijinal kilit, pim, anahtar ve yedek parça kullanınız.

Kullanımı

Çelik pimli kilidin kapatılması ve manyetik anahtar yardımı ile açılması

Kapatılması: Kilidin çelik pimi kırmızı renkli kilit butonunun içine sokulur ve ileri itilip yerine oturtularak kilitlenir. Kilit kapağında hafifçe bir tık sesi duyulur ve pim geri çekildiğinde butondan çıkmaz.


Açılması: Manyetik anahtarın metal yüzü kırmızı kilit butonunun üst yüzeyine iyice temas ettirilir ve aynı anda çelik pim hafifçe döndürülerek geri çekilir ve kilit açılır.

Kemerin uygulanması


- Hastayı tekerlekli iskemle veya sallandığında devrilmeyecek dengeye sahip bir koltuğa oturtunuz.
- Sırtını dik tutarak arkalıya iyice yaslayınız.
- İki üniteden meydana gelen kemerin bel ünitesinin uçlarını sandalyenin (veya koltuğun) arkasından öne doğru getirerek hastanın beline sarınız ve çelik kilit vasıtasıyla sabitleyiniz. (Bkz. Resim 1)
- Kemerin omuz ünitesini hastanın omuzuna yerleştiriniz. (Resim 2)
- Kısa ucunu önde serbest bırakıp uzun olan ucunu iskemlenin veya koltuğun arkasından bel kemerinin üzerindeki köprünün içinden geçirerek ön tarafa getiriniz. (Bkz. Resim 3)
- Hastanın pozisyonunu bozmadan önde göğüs hizasında buluşturulan uçları üst üste getiriniz ve çelik kilitlerin pimini kemerin karşılıklı (üst üste) gelen iki deliğinden geçirerek kilidin plastik buton kısmının içine yerleştirip kilitleyiniz. (Bkz. Resim 4)
- Kemerin hastanın omuzlarını iyice kavradığını ve kaymasını engellediğini kontrol ediniz.
- Dilerseniz metal çerçeveden geriye getirdiğiniz ucu bel kemeri üzerindeki de tespit edebilirsiniz.



Resim 2

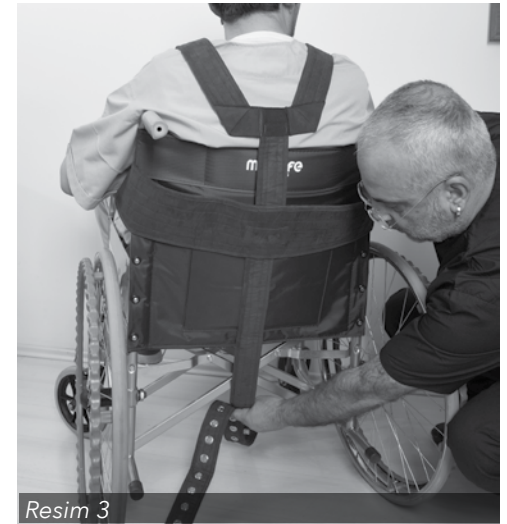

Resim 3

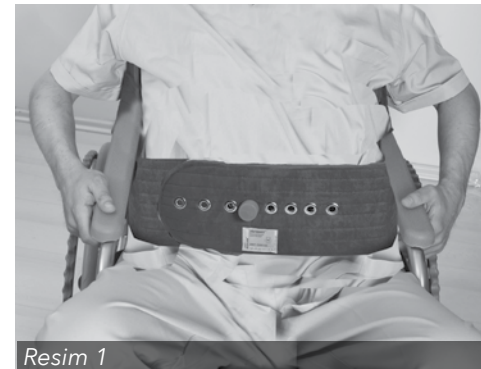

Resim 1



Resim 4



Özel Uyarılar

Kemerin hastanın nefes almasına engel olmadığını ve kan dolaşımına zarar vermediğini kontrol ediniz.
(Bkz. Resim 5)



Resim 5



Ürün Temizliği ve Ömrü

- 1 Ürünü çamaşır makinesinde ve kişisel giysi temizliğinde kullanılan temizlik maddeleri ile yıkayınız, sanayi deterjanı, klor ve çamaşır suyu benzeri ağartıcı maddelerle temizlemeyiniz.
- 2 Maksimum 95 °C'de suyla yıkayınız.
- 3 Kurutucuda veya açık havada kurutunuz. Kurutucuda kurutulurken düşük ısıda kurutulması kullanım ömrünü arttırır
- 4 Ürünü ütölemeyiniz.

