


# KULLANIM METODU


**SCHÜTZERMED®**

**GÖZ KORUMA BANDI**


MODEL : YETİŞKİN  
REF. NO : PEB 304

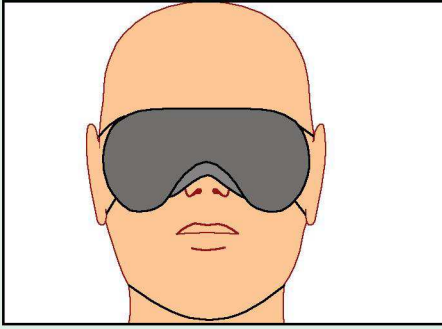


Maskeyi başınızdan geçirin

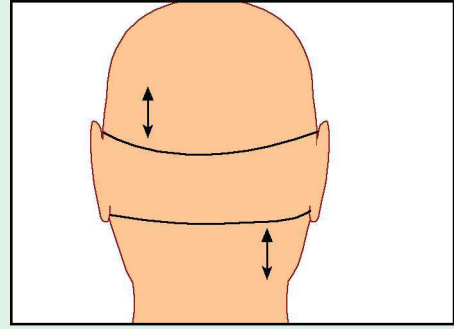

Lastiklerin yerini ayarlayın

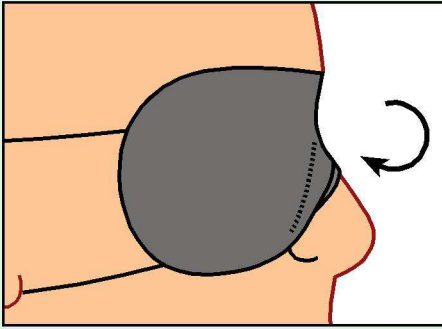

Üçgen parçayı içeri kıvrın

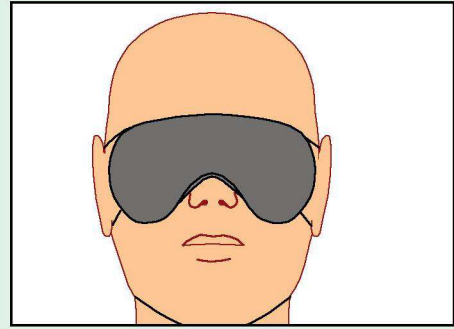

Işığın geçmediğinden  
emin olun



▷ Gama ışını ile sterilize edilmiş

▷  Tek kullanımlık

▷ Tekrar sterilize edilmez

▷ Yırtık ve delik poşetleri kullanmayınız