


KULLANIM METODU


STOPPERMED®

NAZAL TAMPON DESTEK BANDI


MODEL : STANDART
REF. NO : NTH 01

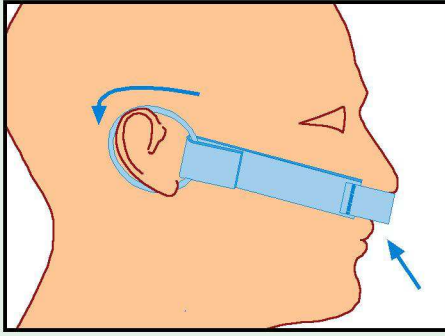


Bandın halkalarını hastanın kulaklarından geçirerek şeffaf kısmı burun tamponunun üzerine getirin

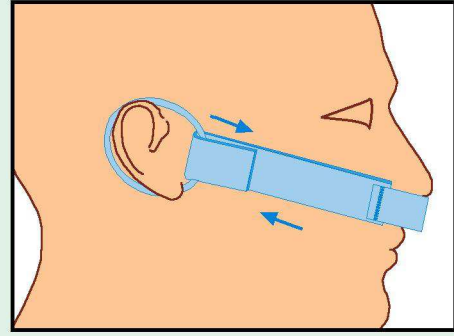

Bandın boyunu tamponu destekleyecek sıklıkta ayarlayın

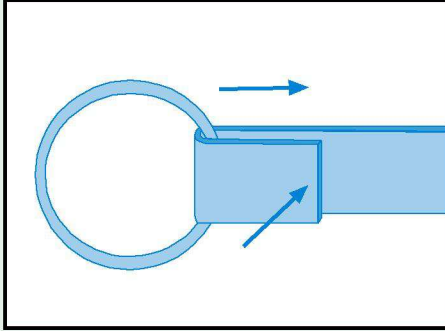

Halkaların kilitlerini kapatarak bandı sabitleyin

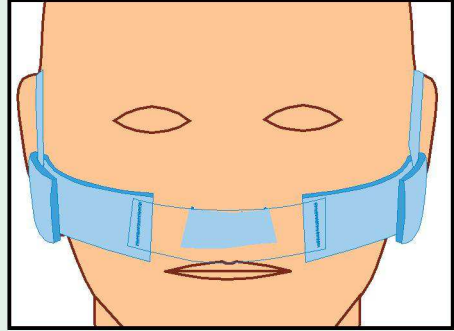

Bandın şeffaf silikon bölümü ile burun tamponunu desteklediğinden emin olun



▷ Gama ışını ile sterilize edilmiş

▷ ② Tek kullanımlık

▷ Tekrar sterilize edilmez

▷ Yırtık ve delik poşetleri kullanmayınız