



# MEDIKOKIM®

## SAFEBELT®

Hasta Sabitleme Kemerleri  
Tokalı Soft Seri El ve Ayak Sabitleme Kemerleri  
Kullanma Kılavuzu



CE

## Genel Bilgiler

Safebelt El ve Ayak kemerleri hastanın el ve ayak bileklerini etkin bir biçimde yatağa

sabitler. Ancak sırt üstü yatan hastanın gövdesini oynatmasına imkan tanır.

## Safebelt® Hasta Kemerleri Genel Uyarılar

- 1 Hastanın güvenliği ve konforu ürünlerin doğru kullanılmasına ve montajına bağlıdır. Hastanın güvenliği için uygulamadan önce kullanım talimatını dikkatlice okuyunuz, kullanma kılavuzunu okumadan ürünü kullanmayınız.
- 2 Hasarlı malzemeler kullanıcı açısından risk , hasta açısından ise rahatsızlık oluşturur. Bu nedenle kullanmadan önce malzemelerin hasarsız ve eksiksiz olduğunu kontrol ediniz. Hasarlı ve yırtık ürünü kullanmayınız.
- 3 Ürünleri hastaya tatbik etmeden önce mutlaka (yatakta ve iskemlede vb gibi) deneyiniz, monte ediniz ve sökünüz, deneyim kazanınız.
- 4 Bu tür kısıtlamalar hastayı huzursuz edebileceğinden kemerleri kullanan has-

talari düzenli olarak izleyiniz ve kontrol ediniz. Çok uzun süre yalnız bırakmayınız.

- 5 Çok uzun süreli hareketsizliğin hastada kas atrofisi ve pıhtı oluşumuna katkı yapabileceğini unutmayınız.
- 6 Ürünlerin kullanım esnasında nefes alıp vermeye veya kan dolaşımına engel olmadığına emin olunuz.
- 7 Ürünlerimiz antialerjik ve soft materyallerden üretilmiştir. Buna rağmen çok uzun süreli kullanımlarda veya çok hassas cilde sahip hastalarda cilde zarar vermediğinden emin olunuz.
- 8 Kullanım esnasında hastanın üzerindeki (mücevher, saat, gözlük, vb.) yaralanmaya neden olabilecek tüm nesnelere çıkarınız.

## Kullanımı

- 1 Hastayı yatağa yatırınız, kemeri bileğe dolayarak velkro kilit ile hastanın çekip çıkaramayacağı sıkılıkta bileğine sabitleyiniz. (Bkz. Resim 1)
- 2 Kemere dikili bulunan emniyet kayışının üzerindeki tokalı kilidi hastanın bileğini sabitleyecek mesafeye getiriniz (ayarlayınız). (Bkz. Resim 2)
- 3 Plastik tokalı kilidi kilitleyiniz. (Bkz. Resim 3)
- 4 Kemerin bağlantı kayışını da karyolanın veya iskemlenin şasesine (istenilen hareket boşluğunu bırakarak) sabitleyiniz. (Bkz. Resim 4 ve 5)



Resim 1



Resim 2



Resim 3



Resim 4



Resim 5



## Özel Uyarılar

- 1 Kemelerin hastanın kan dolaşımına zarar vermediğini kontrol ediniz. (Resim 1)
- 2 Kemerin karyolanın hastaya göre hareket edebilen kısmına bağlı olduğuna ve karyolanın olası pozisyon değişikliğinde hareketinde kemerlerin gerilerek hastaya zarar vermeyeceğine emin olunuz.



Resim 1



## Ürün Temizliği ve Ömrü

- 1 Ürünleri çamaşır makinesinde ve kişisel giysi temizliğinde kullanılan temizlik maddeleri ile yıkayınız. Sanayi deterjanı, klor ve çamaşır suyu benzeri ağartıcı maddelerle temizlemeyiniz.
- 2 Maksimum 95 °C'de suyla yıkayınız.
- 3 Yıkama esnasında velkro kilitlerde iplenme tiftiklenmeyi önlemek için velkro kilitleri kapalı halde yıkayınız.
- 4 Kurutucuda veya açık havada kurutunuz. Kurutucuda kurutulurken düşük ısıda kurutulması kullanım ömrünü arttırır.
- 5 Ürünleri ütölemeyiniz.
- 6 Velkro kilitlerde ipliklenme ve tiftiklenme olduğunda rahat kapanması için mekanik olarak temizleyiniz.