



MEDIKOKIM®

SAFEBELT®

Hasta Destek Kemerleri
Yürüme Destek Kemerleri
Kullanma Kılavuzu



CE



Genel Bilgiler

Safebelt Yürüme Destek Kemerini tek başına yürümekte zorluk çeken hastaların bir yardımcı desteği ile yürütülmesinde kullanılır.

Bele sarılarak kullanılan kemerin üzerinde bulunan bu tutamaklardan tutulmak suretiyle yürüme anında hastaya destek verilir, dengede tutulur, sendeleme ve düşme riski önlenir.



Safebelt® Hasta Kemerleri Genel Uyarılar

- 1 Hastanın güvenliği ve konforu ürünlerin doğru kullanılmasına ve montajına bağlıdır. Hastanın güvenliği için uygulamadan önce kullanım talimatını dikkatlice okuyunuz, kullanma kılavuzunu okumadan ürünü kullanmayınız.
- 2 Hasarlı malzemeler kullanıcı açısından risk, hasta açısından ise rahatsızlık oluşturur. Bu nedenle kullanmadan önce malzemelerin hasarsız ve eksiksiz ol-

duğunu kontrol ediniz. Hasarlı ve yırtık ürün kullanmayınız.

- 3 Hastaya tatbik etmeden önce ürünü mutlaka sağlıklı bir kişide deneyiniz, monte ediniz ve sökünüz, deneyim kazanınız.
- 4 Ürünün kullanım esnasında nefes alıp vermeye veya kan dolaşımına engel olmadığına emin olunuz.



Özel Uyarılar


- 1 Kemerin hastanın nefes almasına engel olmadığını ve kan dolaşımına zarar vermediğini kontrol ediniz.

- 2 Kemerini asla göğüs (göğüs kafesi) üzerinde kullanmayınız.



Kullanımı

- 1 Kemerini hastanın beline sararak öne getiriniz. Öne gelen uçları velkro kilit ile kilitleyerek kemerini bele sabitleyiniz. (Bkz Resim 1)

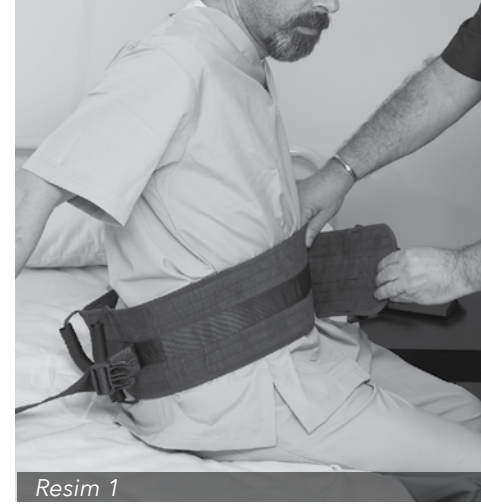

Resim 1

- 2 Kemerinin plastik tokasının boyunu hastanın beline göre ayarlayınız ve kilitleyiniz. (Bkz. Resim 2)




Resim 2

- 3 Kemerinin hastanın bel hizasında olduğunu ve bele hastanın belinden kaymadığını kontrol ediniz. (Bkz. Resim 3)



Resim 3

- 4 Kemerinin üzerinde bulunan tutamaklardan tutarak hastayı kaldırınız ve yürürken destek veriniz. (Bkz Resim 4)

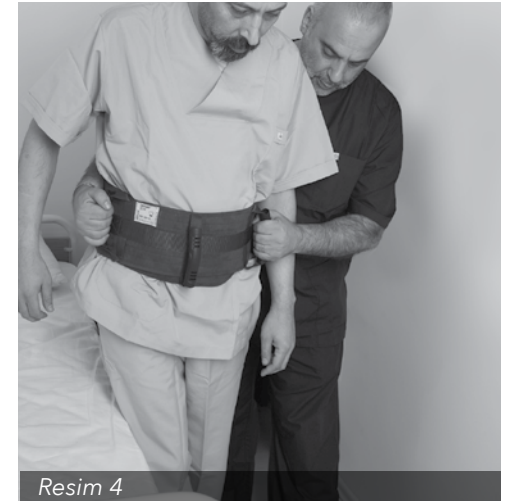

Resim 4



Ürün Temizliği ve Ömrü

- 1 Ürünleri çamaşır makinesinde ve kişisel giysi temizliğinde kullanılan temizlik maddeleri ile yıkayın. Sanayi deterjanı, klor ve çamaşır suyu benzeri ağartıcı maddelerle temizlemeyiniz.
- 2 Maksimum 95 ° C'de suyla yıkayınız.
- 3 Yıkama esnasında velkro kilitlerde ip- lenme tiftiklenmeyi önlemek için velkro kilitleri kapalı halde yıkayınız.
- 4 Kurutucuda veya açık havada kurutunuz. Kurutucuda kurutulurken düşük ısıda ku- rutulması kullanım ömrünü arttırır.
- 5 Ürünü ütölemeyiniz.
- 6 Velkro kilitlerde ipliklenme ve tiftiklen- me olduğunda rahat kapanması için me- kanik olarak temizleyiniz.

SAFEBELT®

Hasta Destek Kemerleri Yürüme Destek Kemerini



Medikokim Tıbbi Kimyevi Malzeme San. Tic. Ltd. Şti

İkitelli O.S.B. Demirciler Sanayi Sitesi B/7 Blok No:157 Başakşehir PK 34306 İstanbul / TÜRKİYE

Tel: 0212 549 57 78 • Fax: 0212 549 57 79 • E-Posta: info@medikokim.com • www.medikokim.com